


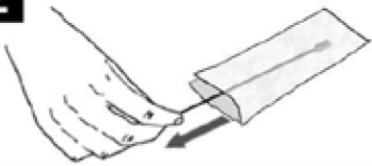



Instruções de uso de esfregaços bucais Isohelix RD-01 com bolsa RapiDri

REF RD-01



Destinado à recuperação de células bucais. Uso individual somente.

Armazenar em temperatura ambiente. Use apenas se a embalagem do cotonete permanecer intacta.

<p>Colete sua amostra de DNA pelo menos 1 hora após comer, beber ou escovar os dentes. Para obter melhores resultados, enxágue a boca com água imediatamente antes da amostragem.</p>	
<p>1</p> 	<p>Abra o pacote de uma das extremidades.</p>
<p>2</p> 	<p>Remova o cotonete do tubo, tomando cuidado para não tocar na cabeça do cotonete branco com os dedos</p>
<p>3</p> 	<p>Insira o cotonete na boca e esfregue firmemente contra a parte interna da bochecha ou sob o lábio superior e inferior. Para coleta de DNA padrão, esfregue por 1 minuto e, em todos os casos, esfregue por no mínimo 20 segundos. Importante - use uma pressão razoável, firme e sólida</p>
<p>4</p> 	<p>Coloque a cabeça do cotonete primeiro na bolsa RapiDri para que a cabeça fique dentro da área de secagem.</p>
<p>5</p> 	<p>Dobre a bolsa RapiDri na linha de dobra, com o lado transparente para dentro, conforme mostrado, e use o adesivo com código de barras para selar.</p>

É de responsabilidade exclusiva do Laboratório ou Usuário Profissional verificar e validar corretamente o uso, técnica e legalmente, desses esfregaços de DNA Bucal para o dispositivo ou processo pretendido.