

Ära söö, joo, suitseta, pese hambaid ega näri närimiskummi 30 minuti jooksul enne proovi võtmist!

Kontrolli, et tuubis olev säilitusvedelik oleks 1 ml joonel enne tuubi avamist.

	<p>1</p> <p>1. Eemalda kogumistuubilt kork. Hoia kork alles. Keera kogumislehter tuubi peale.</p>
	<p>2</p> <p>2. Sülita lehtrisse kuni vedeliku tase tuubis ilma mulle arvestamata on kerkinud 2 ml jooneni. Sülje kogumine võib aega võtta 2 kuni 5 minutit.</p>
	<p>3</p> <p>3. Eemalda kogumislehter ja sulge tuub tihedalt korgiga. Viska kogumislehter minema.</p>
	<p>4</p> <p>4. Raputa kogumistuubi mitu korda, et sülg seguneks säilitusvedelikuga. PÄRAST PROOVI KOGUMIST SÄILITA TUUBI TOATEMPERATUURIL</p>

Ettevaatust! Ära neela alla säilitusvedelikku. Kui säilitusvedelik satub nahale või silma, loputa see kohe rohke veega. Jälgi, et väikelaps tuubi korki suhu ei paneks – lämbumisoht!